



ECHELON CONTOUR™

Grapadora Curvo Cortante ECHELON CONTOUR™ Diseñada para reducir las vías de fuga^{1*}

Utiliza la misma innovación de Tecnología de **Grapado 3D**
y Tecnología de **Superficie de Agarre** que la grapadora
ECHELON CIRCULAR™ Motorizada

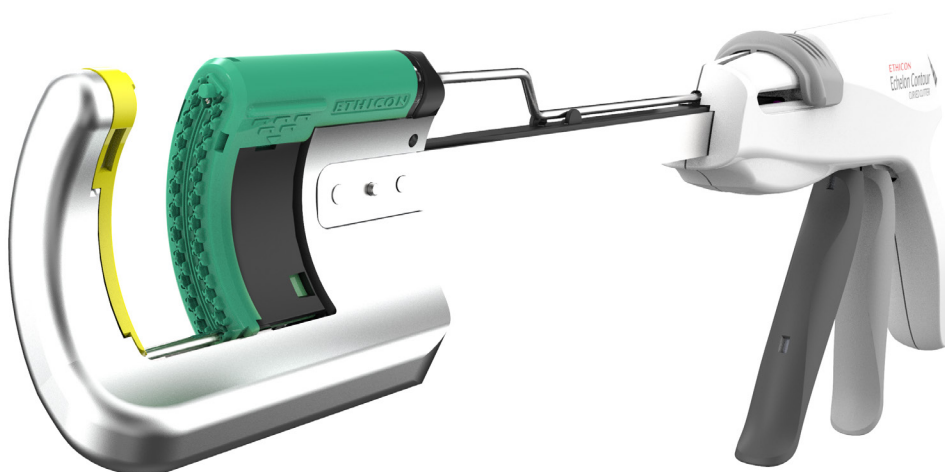


Diseñada para permitir una manipulación suave de los tejidos, al tiempo que proporciona una línea de grapado fuerte.^{2#}

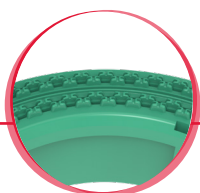

Tecnología de Superficie de Agarre (Gripping Surface Technology, GST)

Menos fuerzas compresivas sobre el tejido^{3†}

La Tecnología de Superficie de Agarre (Gripping Surface Technology, GST), una superficie estriada patentada, comprime el tejido precisamente donde es necesario.⁴

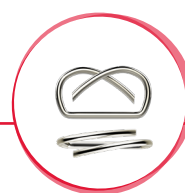

Tecnología de Grapado 3D

Diseñada para distribuir uniformemente la compresión por toda la línea de grapado^{1*}

Con un diseño de curva suave, la Tecnología de Grapado 3D está diseñada para

- Reducir los puntos de tensión elevada en toda la línea de grapado^{1*}
- Distribuir la compresión de manera uniforme por toda la línea de grapado^{1*}
- Limitar posibles vías de fuga^{1*}

ETHICON

Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

Información para pedidos

Grapadora Curvo Cortante ECHELON CONTOUR™



N.º de catálogo	Descripción	Tejido	Filas de grapas	Longitud de la línea de corte	Longitud de la línea de grapado	N.º máx. de disparos	Cantidad
GCS40B	Grapadora Curvo Cortante ECHELON CONTOUR™ con recarga azul, 40 mm	Estándar	4	40 mm	51 mm	6	3
GCS40G	Grapadora Curvo Cortante ECHELON CONTOUR™ con recarga verde, 40 mm	Grueso	4	40 mm	51 mm	6	3

Recarga para ECHELON CONTOUR™ GST



N.º de catálogo	Descripción	Tejido	Altura de la grapa cerrada	Altura de la grapa abierta	Diámetro del alambre	Cantidad
GCR40B	Recarga para ECHELON CONTOUR™ GST azul	Estándar	1,5 mm	3,5 mm	0,20 mm	6
GCR40G	Recarga para ECHELON CONTOUR™ GST verde	Grueso	2,0 mm	4,7 mm	0,23 mm	6

*Simulaciones computacionales basadas en elementos finitos (FEA) en tejido porcino simulado que miden la compresión del tejido después de la aproximación y la formación de grapas, comparando la desviación estándar media de 5,481 de las grapas 2D con la de 5,109 de las grapas 3D (n=37, p<0,05). Los datos de los ensayos preclínicos no son necesariamente indicativos del funcionamiento clínico. #Ensayos de laboratorio en tejido porcino de GCS40B y GCS40G. Fiabilidad de 0,9 con una confianza del 90 % en el tejido indicado para cada recarga. Verificación del diseño de la integridad de la línea de grapado. Los datos de los ensayos preclínicos no son necesariamente indicativos del funcionamiento clínico. *Ensayos de laboratorio en colon porcino que comparan la carga de compresión media de 10,14 kgf (n=32) del dispositivo ECHELON CONTOUR con la de 14,77 kgf (n=30) del CONTOUR (p<0,05). Los datos de los ensayos preclínicos no son necesariamente indicativos del funcionamiento clínico.

1. Ethicon, 500561940A.7 Silhouette Tissue Compression Simulation [Claims – EU], Oct 2020. Ethicon, 500632160A Design Intent for Echelon Contour Curved Cutter, Jan 2021, Data on file (170554-230420 EMEA) 2. Ethicon, 500632160A Design Intent for Echelon Contour Curved Cutter, Jan 2021, Data on file. Ethicon, PRC093619A Silhouette DV FSH/SLI in Tissue Completion Report, April 2020, Data on file. Ethicon, PRC091498A Silhouette Leak Onset Pressure Equivalency Completion Report, Nov 2019, Data on file (166723-230427 EMEA) 3. Ethicon, 500632160A Design Intent for Echelon Contour Curved Cutter, Jan 2021, Data on file. Ethicon, PRC092073A Silhouette Shaft Compression Force Claims Testing, Jan 2016, Data on file (166727-230427 EMEA) 4. Ethicon, 500632160A Design Intent for Echelon Contour Curved Cutter, Jan 2021, Data on file (166725-210208 EMEA)

Estos productos sanitarios cumplen los requisitos de aplicación de la legislación de productos sanitarios.

Consulte las instrucciones de uso para una información más detallada para el uso seguro de estos productos sanitarios.

Contraindicaciones

- Este instrumento no está indicado cuando el grapado quirúrgico está contraindicado.
- El grosor del tejido debe evaluarse cuidadosamente antes de disparar una grapadora. Consulte el requisito de compresión del tejido (altura de la grapa cerrada) para cada tamaño de grapa en la tabla de códigos del producto, más adelante. Si el tejido no se puede comprimir fácilmente a la altura de la grapa cerrada que se indica en la tabla o si se comprime fácilmente a una altura menor, el tejido está contraindicado ya que es posible que sea demasiado grueso o demasiado delgado para el tamaño de grapa seleccionado.
- No utilice el instrumento en tejido isquémico o necrótico.
- No utilice el instrumento en vasos sanguíneos.

Efectos secundarios no deseados y riesgos residuales

Los efectos secundarios no deseados y los riesgos relacionados con el grapado quirúrgico incluyen la posibilidad de hemorragia, lesiones en los tejidos, introducción de superficies no estériles o transmisión de patógenos, reacción inflamatoria o no intencionada de los tejidos, e incompatibilidad de la resonancia magnética a cuerpos extraños. Por otra parte, si se producen fallos en la línea de grapado, si no se puede cortar o si el dispositivo está dañado, pueden producirse daño involuntario, podría alargarse la intervención quirúrgica o podría variar el planteamiento quirúrgico.

Consulte siempre las instrucciones de uso o el prospecto incluidos con el dispositivo para ver las instrucciones completas más recientes.

Las marcas de terceros que se utilizan en el presente son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Distribuidor:

Johnson & Johnson, S.A.
Paseo de las Doce Estrellas, 5-7
28042 Madrid

www.jnjmedtech.com/es-ES

ETHICON
Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

© Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH 2023, ES_ETH_STAP_304443